


Guía rápida *Rapid Test*® Panel de Testeo Multidroga (Orina)

- ① Asegúrese que todos los materiales y muestras estén a temperatura ambiente

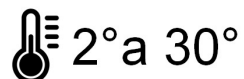

- ② Saque el cassette DOA de su envoltorio individual
- ③ Identifique el cassette DOA con la ID del paciente
- ④ Retire la tapa protectora, sumerja las tiras del cassette en el recipiente con orina, de manera que el nivel de orina no toque la tarjeta de plástico
- ⑤ Mantenga el dispositivo en la orina hasta que aparezca un color rojizo en la zona de ensayo (aproximadamente 20 segundos con timer)



- ⑥ Coloque de nuevo la tapa protectora
- ⑦ Lea los resultados al cabo de 5 minutos después de añadida la muestra. No leer transcurridos más de 10 minutos.

- ◆ Positivo : Sólo una banda coloreada aparece en la membrana (línea C). Ninguna banda coloreada aparece en la region de testeo (línea T)



- ◆ Negativo : Dos bandas coloreadas aparecen en la membrana. Una banda aparece en la region control (línea C) y la otra en la region de testeo (línea T)



- ◆ Inválido: La banda control falla en aparecer. El resultado de cualquier test en la cual no se produce la banda control (línea C) en el tiempo especificado debe ser descartado. Por favor, revise el procedimiento llevado a cabo y repita con un Nuevo test. Si el problema persiste, discontinue su uso y contáctese con su distribuidor local.



- ◆ A considerar: La intensidad en la región de testeo (línea T) puede variar dependiendo de la concentración de analitos en la muestra. Cualquier intensidad de color de la región de testeo debe ser considerada negativa.

PUEDES ENVIAR UNA FOTO CON TU RESULTADO A POSTVENTA@RAPIDTEST.CL PARA UNA CONFIRMACIÓN.



Rapid Test Chile Ltda. Dirección: Avenida Príncipe de Gales 5921, Oficina N°305, La Reina-Santiago-Chile. Teléfono 562 2474365.- 562 2474366. Mail: ventas@rapidtest.cl.



Rapid Test Chile Ltda. Dirección: Avenida Príncipe de Gales 5921, Oficina N°305, La Reina-Santiago-Chile. Teléfono 562 2474365.- 562 2474366. Mail: ventas@rapidtest.cl.